



کنترل تمامی پارامترها کلید Accept را که روی کی بورد دستگاه قرار دارد را فشار می دهیم ، تمامی پارامترها تأیید شده و فعال می شوند.

۱۳- Apnea Setup : بعد از انجام تنظیم وزن ایده آل (IBW) ونتیلاتور به صورت اتوماتیک تنظیمات Apnea را انجام می دهد ولی برای تغییر و تنظیم پارامترها می توانیم از گزینه Apnea Setup در صفحه پائین و کنار گزینه Vent Setup استفاده کنیم و برای تأیید تنظیمات کلید Accept را فشار می دهیم.

۱۴- گزینه Alarm Setup که در صفحه پائین (Lower Screen) قرار داشته و کنار گزینه Apnea Setup می باشد و برای تنظیمات محدوده های پائین و بالای آلامها استفاده می شود و بعد از تنظیمات آلام کلید Accept را فشار می دهیم.

۱۵- برای کالیبره کردن سنسور اکسیژن کلید  $100\% O_2/CAL$  را فشار داده و سنسور اکسیژن را کالیبره می نماییم. ضمناً در حین کالیبره ۲ دقیقه دستگاه ، اکسیژن را با غلظت  $10.0\%$  تحویل می دهد.

۱۶- بعد از اینکه تمامی مراحل فوق را انجام داده و همه تنظیمات را Accept کردیم ، حال می توانیم بیمار را به دستگاه وصل کنیم و بلافاصله بعد از وصل کردن بیمار به دستگاه ونتیلاتور ، عمل تهویه را شروع می کند.

۱۷- اگر بیمار را قبل از کامل شدن تنظیمات به دستگاه وصل کنیم ، دستگاه در قسمت آلامها در صفحه بالا (Upper Screen) آلام Procedure Error را نمایش می دهد که باید برای رفع این آلام ، ابتدا کلید Reset را فشار داده و سپس تنظیمات را کامل انجام داده و کلید Accept را فشار دهیم تا آلام رفع شود.

جدول راهنمای مدار تنفسی بیمار (ست لوله) IBW :

توسط دستگاه پیشنهاد می شود.	Neonatal : 0.3 - 7.0 Kg Pediatric : 7.0 - 24 Kg Adult : 25 - 150 Kg
دستگاه پیشنهاد نمی کند ولی کاربر اجازه دارد.	قابل اجرا نیست : Neonatal Pediatric : 3.5 - 6.5 Kg و 25-35 Adult : 7.0 - 24 Kg